

epiivo®

JUCKREIZ LINDERN MIT THERMOTHERAPIE

Die schnelle Hilfe bei Juckreiz



Wirkt mit Wärme

epiivo® IST EIN THERMOTHERAPIEGERÄT ZUR SYMPTOMATISCHEN BEHANDLUNG VON AKUTEM UND CHRONISCHEM JUCKREIZ.

EINFACH UND PRAKTISCH

Ein-Knopf-Anwendung



SCHNELL UND EFFEKTIV

Die Behandlungszeit beträgt nur 5 Sekunden.



OPTIMALE TEMPERATUR

Individuell zwischen 2 Temperaturen wählbar.



AKKUBETRIEBEN

Bis zu 250 Anwendungen sind mit einer Akkuladung möglich. Inkl. USB-Schnellladekabel.



CHEMIEFREIE BEHANDLUNG

Wirkt ausschließlich mit konzentrierter Wärme.




DERMATOLOGISCH GETESTET

Auch für Allergiker, Schwangere und Kinder* geeignet.



WIRKPRINZIP: MIT WÄRME JUCKREIZ LINDERN

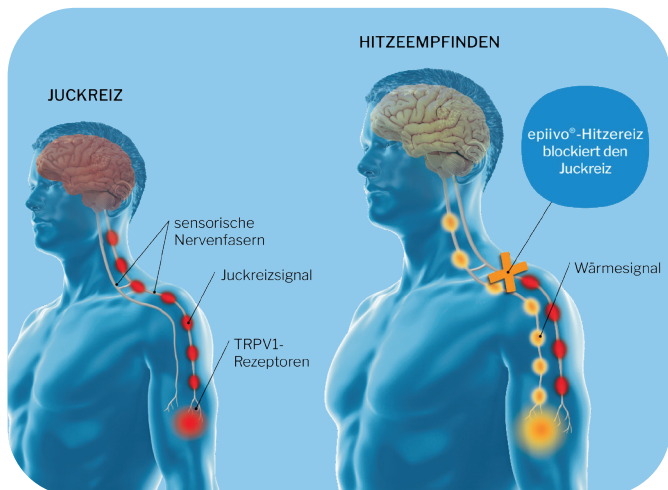

Durch das thermotherapeutische Verfahren wird konzentrierte Wärme lokal auf die juckende Hautpartie appliziert. Hautrezeptoren werden aktiviert und leiten den Wärmereiz weiter. Der Signalweg für den Juckreiz wird blockiert und Linderung kann einsetzen. epiivo® wirkt chemiefrei und ist daher auch für Schwangere, Allergiker und Kinder* geeignet.

*Eigenanwendung bei Kindern ab 12 Jahren. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kindern unter 3 Jahren. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob die symptomatische Behandlung mit epiivo® für Ihr Kind geeignet ist. Bitte bedenken Sie auch, dass Kinderhaut noch in der Entwicklung ist und damit sensibler auf Wärmereize reagieren kann.

IN 4 SCHRITTEN JUCKREIZ STILLLEN



1 Je nach Therapiebedarf kann zwischen zwei Temperaturstufen (ca. 47 °C oder ca. 49 °C) ausgewählt werden.



2 Hautfreundliche keramische Kontaktfläche auf das betroffene Hautareal platzieren und Drucktaste betätigen.



3 Die Behandlungsdauer beträgt 5 Sekunden.



4 Besser fühlen.

Hinweis: Bitte Gebrauchsanweisung befolgen.



LINK ZUM PRODUKT-/ANWENDUNGSVIDEO (YOUTUBE):

<https://www.youtube.com/watch?v=89bQfShr5sU>



PRODUKTUMFANG:

- epiivo® Thermotherapiegerät
- Hochwertiges Case für sichere Aufbewahrung und Transport
- USB-Schnellladekabel mit USB-C Port
- Gebrauchsanweisung

PZN: 16236130

Preis: 299 € UVP



Weitere Informationen finden Sie auf: www.epiivo.com